



DENTAL FLEX ITALIA®

dental innovation

KOMPLETNY SYSTEM WTRYSKU TERMICZNEGO

iPress®
VIVA FLEX PARTIALS®



i P r e s s ®

System wtrysku
termicznego - iPress®

W zestawie:

- 1 puszka
- 1 smar silikonowy
- 1 metalowa szczotka
- 1 kabel zasilający
- instrukcja obsługi
- 2 lata gwarancji

WTRYSKARKA iPress®

Panel sterowania został zaprojektowany w czytelny dla użytkownika sposób.

Dwa duże wyświetlacze ułatwiają wizualną kontrolę parametrów wtrysku z każdego miejsca pracowni. Każdy przycisk posiada tylko jedną funkcję, dzięki czemu obsługa wtryskarki iPress® jest bardzo prosta i intuicyjna.

System wtrysku iPress® na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo użytkownika, dlatego też został on zaprojektowany w zewnętrzny i wewnętrzny system bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami CE.

PARAMETRY

- w pełni automatyczna
- funkcja podgrzewania puszek
- temperatura 40-400°C
- otwarty system - możliwość pracy na każdym materiale dostępnym na rynku
- przyjazne dla użytkownika sterowanie
- ciśnienie robocze 7-8 Bar
- wymiary urządzenia: 16cm x 21cm x 49cm (h)
- średnica tłoka 25mm



VIVA FLEX PARTIALS L.F.

Jeden z najbardziej uniwersalnych materiałów do wykorzystania przez technika dentystycznego.

Pakowany w pojedyncze, gotowe naboje oraz w opakowania 500g.

Naboje dostępne w wersji 22mm i 25mm.

Viva Flex Partial LF®

to idealnie skomponowany materiał na każdy rodzaj protezy częściowej, gwarantujący odpowiednią równowagę między elastycznością a sztywnością. Ekstremalnie łatwy w obróbce, polerowaniu na wysoki połysk oraz odporny na przebarwienia.

MATERIAŁ GRAMATURA ZASTOSOWANIE

MATERIAŁ	GRAMATURA	ZASTOSOWANIE
XL	23g	protezy częściowe
M	15g	dotryski, klipsy
opakowanie zbiorcze	500g	



VIVA FLEX PARTIALS® SOFT

Naboje dostępne w wersji 22mm i 25mm.

Viva Flex Partial Soft®

jest miękkim materiałem termoplastycznym wykorzystywanym do prac z nadmiernymi podcieniami. Jego struktura jest bardziej miękka i zapewnia większą elastyczność. Jest idealnym materiałem na protezę poekstrakcyjną lub przedimplantacyjną.



MATERIAŁ GRAMATURA ZASTOSOWANIE

MATERIAŁ	GRAMATURA	ZASTOSOWANIE
XL	23g	protezy częściowe
M	15g	dotryski, klipsy
opakowanie zbiorcze	500g	

The logo for BiOSSiS features a stylized 'B' composed of three horizontal lines in a pinkish-purple color. This is followed by 'i' in a smaller pinkish-purple font, 'OSSiS' in a large, bold, grey sans-serif font, and a registered trademark symbol (®) at the end.

BiOSSiS® (PEEK) jest dostępny w dwóch kolorach: białym i różowym.

BiOSSiS® PEEK jest tworzywem termoplastycznym o wysokiej biokompatybilności i odporności na zużycie.

Wolny od metali, monomeru, obojętny dla środowiska jamy ustnej, stanowi alternatywny materiał dla stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.

BiOSSiS® jest dostępny w formie granulatu w opakowaniach 25g, 55g i 700g.

Chcesz wiedzieć więcej? Masz pytania?


Skonsultuj się z naszym specjalistą ds. systemów termoplastycznych.

tech. dent. Szymon Rosiński

tel. 888 099 860

szymon.rosinski@mikran.com



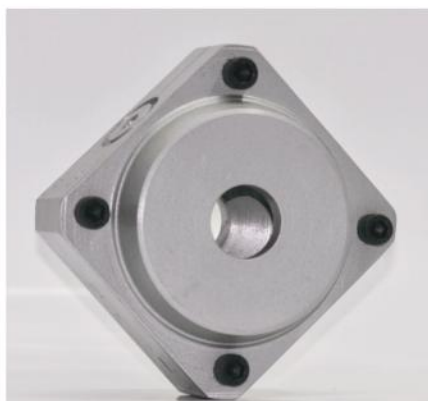

Bardzo mocna pushka, frezowana z jednego bloku aluminiowego.

PARAMETRY

- 4 śruby mocujące
- rozmiar: 13,5 x 8 x 12cm
(dł. x szer. x wys.)
- waga: 1,6kg



Tuby na naboje wykonane są z wysokiej jakości aluminium, specyficznego do wtrysku termoplastów.

PARAMETRY

- waga: 7g
- dostępne rozmiary: średni, duży
- dostępne średnice: $\varnothing 22$ i $\varnothing 25$ mm
- pojemność materiału: do 25g

W zestawie tuba z kapslem.

A K C E S O R I A

Pojemnik na protezy z wygodnym, wyjmowanym koszem, który umożliwia wyciąganie protezy bez kontaktu z wodą lub roztworem.



Pojemnik służący do komfortowego transportu każdego rodzaju protezy. Mocna uszczelka umożliwia transport z niewielką ilością wody.



FAQ

MATERIAŁY

Czym jest materiał VIVA FLEX LF i VIVA FLEX SOFT?

Materiały VIVA FLEX to materiały do wtrysku o dużej i średniej elastyczności idealne na protezy częściowe.

Jaki materiał najlepiej użyć do protezy częściowej?

Materiał VIVA FLEX LF to materiał o najlepszej kombinacji elastyczności i sztywności. Łatwy w opracowaniu i polerowaniu na wysoki połysk. Standardowym wyborem na protezy częściowe jest VIVA FLEX LF, natomiast VIVA FLEX SOFT dedykowany jest do protez przedimplantacyjnych i poekstrakcyjnych.

Jaki jest czas i temperatura topienia materiału VIVA FLEX?

VIVA FLEX LF topi się w temperaturze 280°C a VIVA FLEX SOFT w temperaturze 265°C. Oba materiały topią się 15 minut.

Czy materiały mogą być ponownie przetapiane?

Ponowne przetapianie materiału nie jest zalecane, ponieważ może mieć to wpływ na pogorszenie właściwości mechanicznych i estetycznych.

Czy materiały VIVA FLEX mogą być użyte w innych wtryskarkach?

Tak. Materiały VIVA FLEX mogą być stosowane we wszystkich wtryskarkach. Należy jednak sprawdzić czy urządzenia te osiągają niezbędną do przetopienia temperaturę i osiągają ciśnienie robocze 7-8 Bar.

Jak naprawić protezy z materiału VIVA FLEX?

Naprawa protez z materiału VIVA FLEX odbywa się poprzez dotrysk.

WTRYSKARKA iPress®

Jakie jest ciśnienie robocze we wtryskarce iPress®?

Optymalne ciśnienie jakie należy podłączyć do urządzenia to 7-8 Bar.

Czy urządzenie grzeje samodzielnie puszkę?

Tak. Wtryskarka iPress® samodzielnie grzeje puszkę. Nie jest wymagane jej wcześniejsze podgrzewanie.

Czy urządzenie zgina naboje i jest automatyczne?

Tak. Po zakończonym czasie topienia tłok automatycznie zgniecie nabój.

Czy mogę wtrysnąć PEEK na wtryskarce iPress®?

Tak. Wtryskarka nagrzewa się maksymalnie do 400°C.

Czy mogę wtrysnąć inne materiały na wtryskarce iPress®?

Tak. Urządzenie posiada otwarty system dzięki czemu możemy wtrysnąć każdy materiał.

CENNIK

NABOJE

22mm



MATERIAŁ	ŚREDNICA	ROZMIAR	CENA	KOLOR	KOD_MIKRAN
Viva Flex Partial LF	22mm	XL - 23g	49 zł	LF2	16270
				LF3	16272
Viva Flex Partial LF	22mm	M - 15g	44 zł	LF2 LF3	16271 16273
Viva Flex Partial SOFT	22mm	XL - 23g	49 zł	VS 1	16276

25mm

MATERIAŁ	ŚREDNICA	ROZMIAR	CENA	KOLOR	KOD_MIKRAN
Viva Flex Partial LF	25mm	XL - 23g	49 zł	LF2	16266
				LF3	16268
Viva Flex Partial LF	25mm	M - 15g	44 zł	LF2 LF3	16267 16269
Viva Flex Partial SOFT	25mm	XL - 23g	49 zł	VS 1	16277

OPAKOWANIA ZBIORCZE




MATERIAŁ	ROZMIAR	CENA	KOLOR	KOD_MIKRAN
Viva Flex Partial LF	500g	500 zł	LF2	16274
			LF3	16275
BIOSSIS	25g	179 zł	PINK/WHITE	16279

WTRYSKARKA I AKCESORIA




MATERIAŁ	CENA	KOD_MIKRAN
Wtryskarka iPress	12 990 zł	226
Puszka do iPress	610 zł	227
Tuby aluminiowe	22mm	16282
	25mm	16283
Pojemnik z koszykiem	28,50 zł	16284
Izolator silikonowy	78 zł	16280

PRODUCENT:

 Dental Flex Italia S.n.c., / Via Montevergine, 62 / ospedaletto d'Alpinolo (AV) / 83014 - Italy / VAT 02570240644
Registration CCIA Avellino N° 167532 / www.dentalflexitalia.eu

DYSTRYBUTOR:

 Mikran sp. z o.o. sp.k. / ul. Wojskowa 3/L4 / 60-792 Poznań / PL7831008373 / tel. +48 61 847 58 58 / www.mikran.pl